

FUJIFILM	Accès et utilisation de SynapseWave (XP, Vista, Seven)		
Rédacteur	Destination	Date	
Equipe SYNAPSE	Prescripteurs Lorient	13/10/2016	

Objectif

Savoir Accéder et utiliser SynapseWave

Pré-Requis

Microsoft Silverlight doit être installé.
S'il n'est pas installé, la procédure suivante vous l'expliquera.

A savoir

Toutes les plateformes (Mac, Microsoft) et nous vous conseillons d'utilisez safari ou Internet Explorer

I – Microsoft Silverlight

Si Microsoft Silverlight n'est pas installé, veuillez suivre cette étape. Sinon allez à l'étape suivante.


Aller sur notre site Internet (ACCES MEDECIN) :

<http://www.radiologie-lorient.com/resultats-examens-radiologie-lorient/p6.html>

Ou lancez votre Navigateur Internet puis entrez l'adresse suivante

<https://resultats.imagerie-lorientaise.fr:444/?mode=medecin>

Si Microsoft Silverlight n'est pas installé, cette fenêtre s'ouvrira. Cliquer sur l'image Microsoft Silverlight comme ci dessous

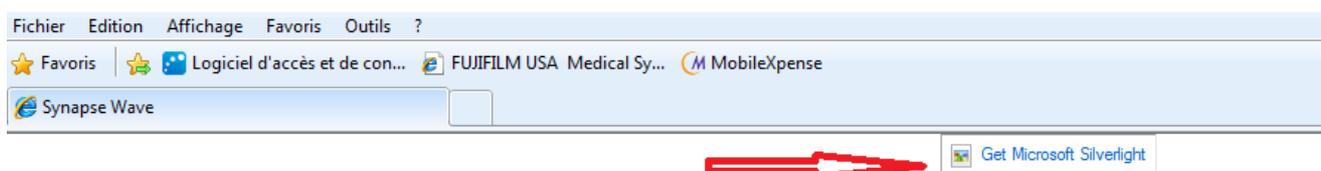

Ensuite cliquez sur « Exécuter »

FUJIFILM	Accès et utilisation de SynapseWave (XP, Vista, Seven)		
Rédacteur	Destination	Date	
Equipe SYNAPSE	Prescripteurs Lorient	13/10/2016	



Cliquez de nouveau sur « **Exécuter** »



Cliquez ensuite sur « **Installer Maintenant** »



Quand l'installation est terminée, cliquez sur « **Fermer** »

FUJIFILM	Accès et utilisation de SynapseWave (XP, Vista, Seven)		
Rédacteur	Destination	Date	
Equipe SYNAPSE	Prescripteurs Lorient	13/10/2016	

II – Utiliser SynapseWave

Si vous disposez déjà de Silverlight ou si vous venez de l'installer, une fois saisie l'adresse <https://resultats.imagerie-lorientaise.fr:444/?mode=medecin>

Puis vous arriverez au site web



L'identifiant correspond à votre login donné par le cabinet de radiologie ainsi que votre mot de passe
Valiez ensuite en cliquant sur le bouton **Connexion**

FUJIFILM	Accès et utilisation de SynapseWave (XP, Vista, Seven)		
Rédacteur	Destination	Date	
Equipe SYNAPSE	Prescripteurs Lorient	13/10/2016	

Puis vous arrivez a la liste des examens du jour que vous avez prescrits

A l'aide des filtres situés vous pouvez rechercher un patient

Patient	Date de Naissance	N° Examen	Date Examen	Modalité	Statut	In

Pour ouvrir un examen et voir les images il suffit de faire un double clic sur celui désiré.

<p><u>Affiche le Compte Rendu</u> Une nouvelle fenêtre s'ouvre</p>		<p><u>Chainer les images</u> Applique l'outil sélectionné à toutes les images</p>
<p><u>Active/Désactive le zoom</u> Utiliser la molette de la souris pour zoomer ou dé zoomer</p>		<p><u>Enlever le zoom</u></p>
<p><u>Active/Désactive le fenêtrage</u> Maintenir le Clic Gauche sur l'image puis déplacer la</p>		<p><u>Enlever le fenêtrage</u></p>
		<p><u>Modifie la disposition des séries</u></p>

Pour revenir a la liste des examens il suffit de cliquer sur retour liste (en haut a droite)



Pour vous déconnecter, fermer la fenêtre de votre navigateur.